

Каталка больничка с матрацем AR-A82, AR-A82.1

1. Предназначение

Каталка предназначена для транспортировки пациентов. Без матраца возможно использование в моргах и отделениях судебно-медицинской экспертизы.

2. Общая характеристика

Каталка состоит из следующих частей:

- несущий каркас;
- ложемент с регулируемой спинкой и опускающимися боковыми ограждениями, матрацем.

3. Описание

3.1. Несущий каркас. Жесткая, цельносварная конструкция, выполненная из стального профиля 25х25 мм. ГОСТ 1050. Покрытие эпокси-полиэфирная порошковая краска для группы условий эксплуатации УХЛ4. К раме фиксируются 4 самоориентирующихся колеса д. 125 мм. из серой резины с индивидуальным тормозом. Регулировка спинной секции - Вручную, ступенчато, 0-50°.

3.2. Колесные опоры обеспечивают легкость передвижения и управления каталкой, крепежные изделия, используемые при сборке каталки имеют гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации.

3.3. Ложемент с регулируемой спинкой и опускающимися боковыми ограждениями: жесткая, цельносварная конструкция, выполненная из стальной трубы прямоугольного сечения. Каркас спинки-стальная труба 20х20 мм. Боковые и торцевые ограждения изготовлены из трубы Ø20 мм ГОСТ 1050. Ложемент жестко фиксируется к несущей раме с помощью винтового соединения, имеет опускающиеся, легко фиксируемые ограждения, надежную тормозную систему, мягкий матрац, регулируемую по углу наклона спинку.

3.4. Матрац изготовлен из медицинского кожаменителя SCADEN устойчивого к дезобработке и УФ излучению. Матрац заполнен мягким наполнителем. Подъем и опускание спинки каталки осуществляется механически, с помощью самофиксирующегося механизма и ручек, закрепленных на каркасе спинки.

3.5. Крепежные изделия, используемые при сборке каталки должны иметь гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы должны соответствовать ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 17475-80 и ГОСТ 11738-84.

4. Упаковка, транспортировка и хранение

Тумба обернута бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должно хранить в закрытом помещении при температуре от -5°C до +40°C при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 °C и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеяка), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (18 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель осуществляет за собой право вносить изменение в конструкцию, без уведомления заказчика, и не ухудшающие работоспособность изделия.

Артикул	Габаритные размеры	Характеристика
AR-A82	ДхШхВ 1950х650х950	Металл в полимере, регулировка угла наклона спинной секции в диапазоне 0-50° с механической фиксацией; - регулировка высоты боковых барьеров в диапазоне 0–200 мм (автофиксация); - матрац съемный, с полумягким наполнением и чехлом из кожаменителя медицинской серии (1900х600х30, мм) - 4 самоцентрирующихся колеса Ø125 мм (2 – с тормозом)
AR-A82.1	ДхШхВ, мм – 1950х650х950, с механизмом подъема ложа с гидравлическим приводом, управляемым ножной педалью (диапазон высот от 540 до 930, мм)	Металл в полимере, регулировка угла наклона спинной секции в диапазоне 0-50° с механической фиксацией; - регулировка высоты боковых барьеров в диапазоне 0–200 мм (автофиксация); - матрац съемный, с полумягким наполнением и чехлом из кожаменителя медицинской серии (1900х600х30, мм) - 4 самоцентрирующихся колеса Ø125 мм (2 – с тормозом);

Свидетельство о приемке

Комплект и его составные части соответствуют требованиям
ТО ВУ 190666709.006-2013 (ГОСТ 19917-2014) и признан годным к
эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки _____

Бригада _____

М. П.

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район
д. Михановичи
Телефон: +375175415232



ARTINOX

Медицинская металлическая мебель собственного производства

ПАСПОРТ



Каталка больничная
серии AR
ГОСТ 19917-2014